


# 組立説明書


商品名： どこでもスクリーン 検査用シールド

型 式： DSU-KS-W

## セット内容

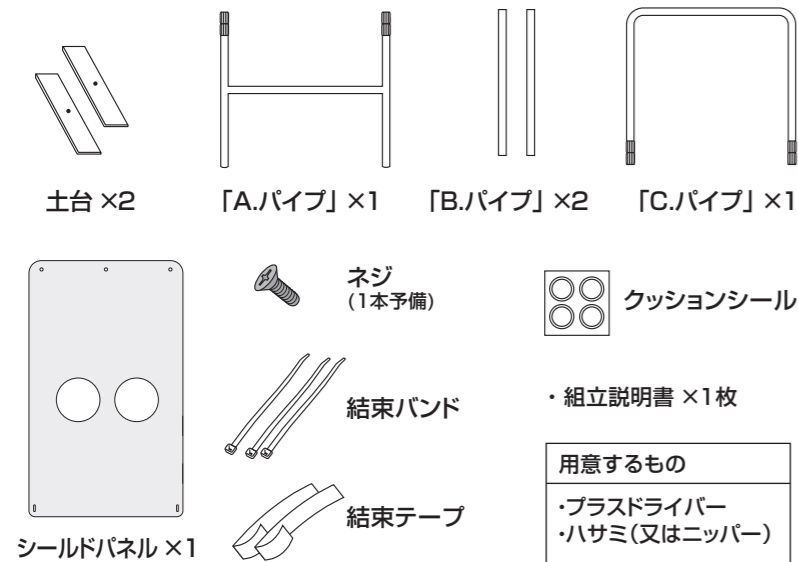

## 仕様・品質表示

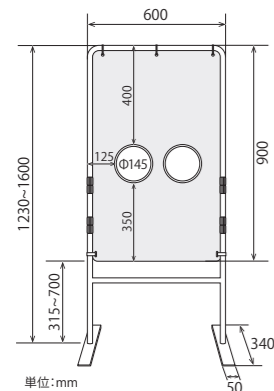


セット内容	本体、透明パネル1枚、結束バンド、クッションシール、結束テープ、組立説明書
サイズ・重量	本体：W600×H1230～1600×D340mm 透明シールド板：W596×H900mm×t3.0mm 重量：5.5Kg
素 材	スチールパイプ（φ19.1・φ15.9mm）塗装済、 ナイロン（結束バンド）、ABS樹脂（パイプストッパー） フェルト（滑り止め）、ポリプロピレン（結束テープ） スチール（ネジ）、ポリウレタン（クッションシール） 硬質塩化ビニール（シールドパネル：厚さ3mm） 軟質塩化ビニール（穴カバーモールド）
製 造	日本製


## ⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所に長時間置いたり、高温・火気のあるものに近づけないでください。  
フレームは鉄製パイプを使用しているため、直射日光が長時間あたると高熱になることがあります。  
また、変形・高熱となる原因になります。
- 寄りかかったり、強い衝撃を与えないでください。  
転倒や破損によるケガの原因になります。また、つかまり立ちをすると転倒の可能性がありますので、ご注意ください。
- お手入れにベンジン・シンナーなどを使用しないでください。  
変形・変色・色落ちの原因になります。


**1** シールドパネルの保護シートを両面はがします。

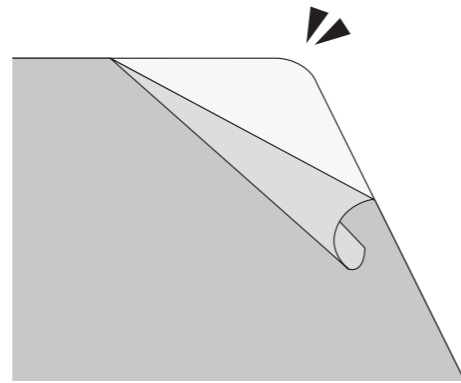


**2** 「C.パイプ」に、シールドパネルを重ね上部3箇所を結束バンドで取付けてください。

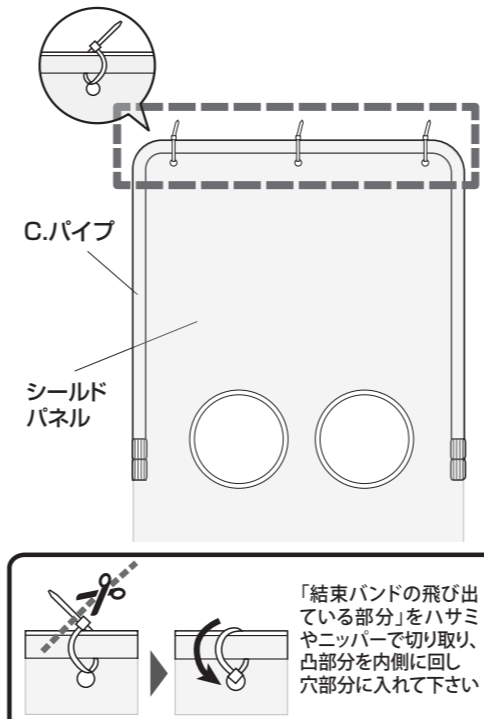

**3** 次に、「土台」を組み立てます。図のように、「土台」と「A.パイプ」をネジ止めします。

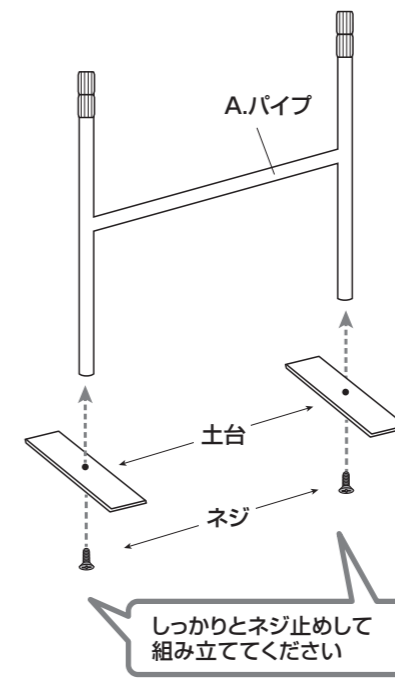


**4** **3**の左右のパイプストッパーを回しゆるめます。  
「B.パイプ」を差し込み、パイプストッパーを絞めて固定してください。（左右ほぼ同じくらいの高さで固定してください）

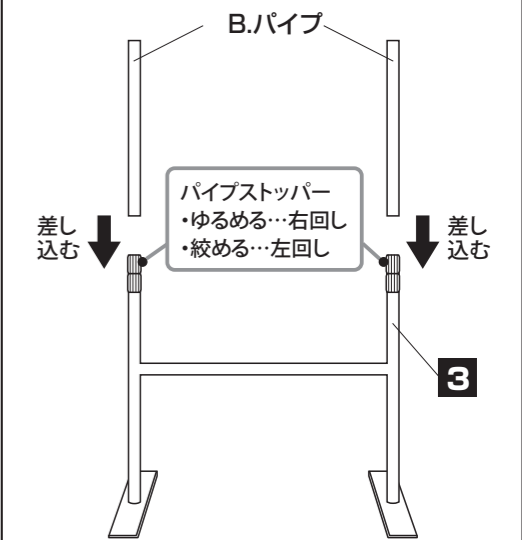


**5** 組立てた**2**と**4**を合体して、パイプストッパーを絞めて固定してください。


【注意】  
シールドパネルを落とさないようご注意ください！

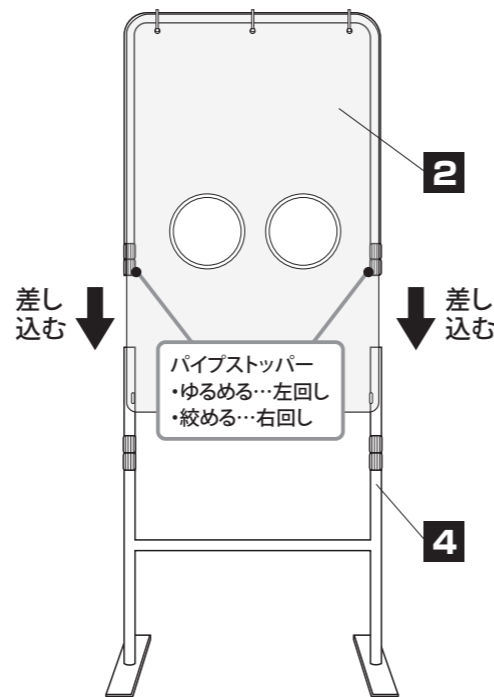


**6** 設置場所に配置し、本体の高さを調節してください。

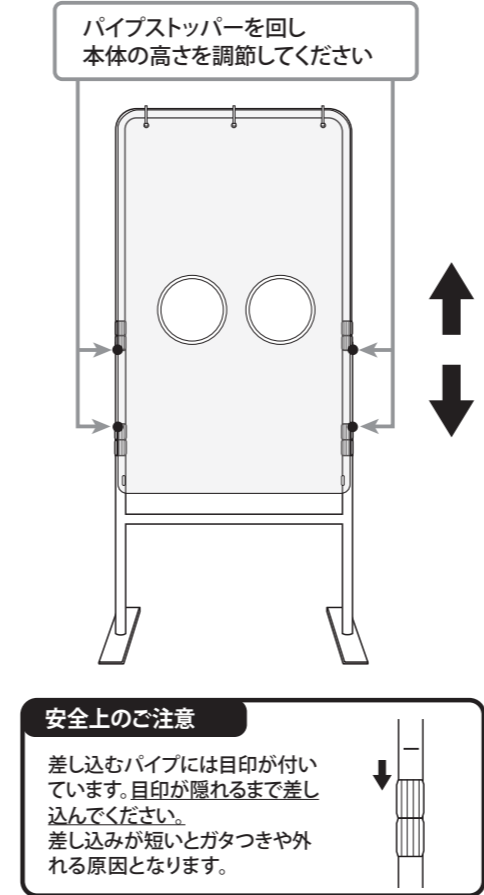

**7** 高さが決まったら、シールドパネルのパイプストッパーがあたる部分（4箇所）に付属のクッションシールを貼ってください。

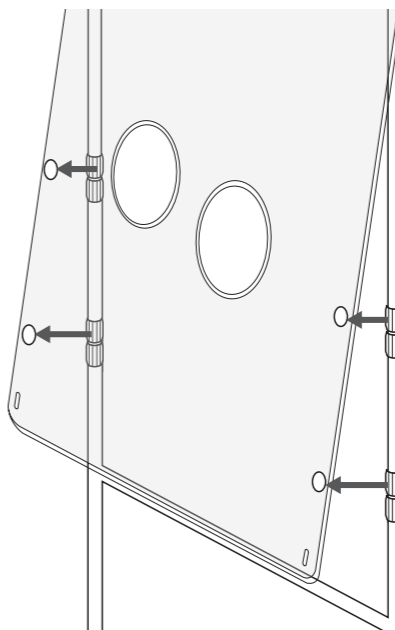


**8** 最後に、シールドパネルの下2箇所を付属の結束テープでパイプに巻き付けて留めて完成です。

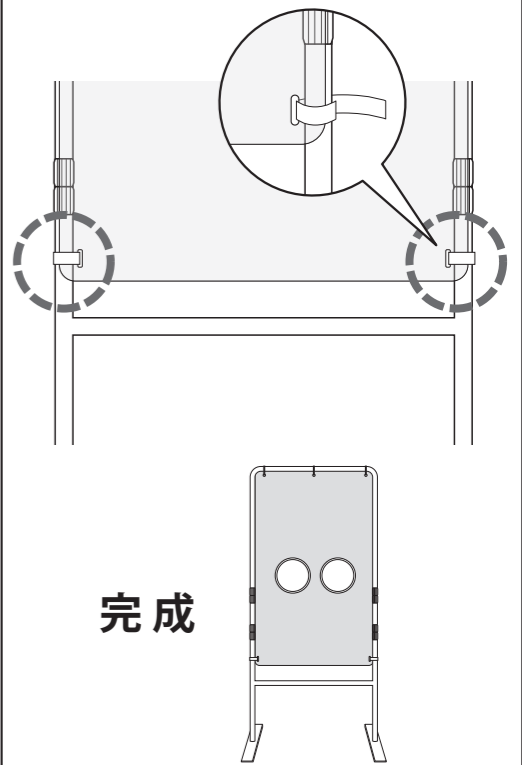

お手入れの方法は、裏面をご覧ください ➡

## お手入れについて

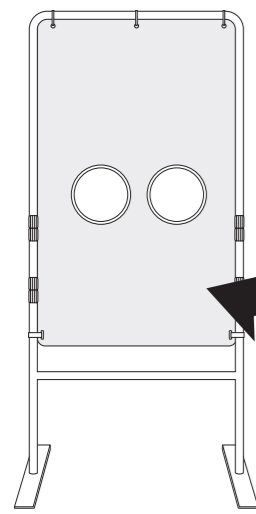


シールドパネルは『硬質塩化ビニール』素材のため  
アルコール液や次亜塩素酸でのお手入れもOKです！

アルコール  
OK

次亜塩素酸  
OK

アルコール液などは  
布に吹きかけてから  
お手入れしてください。

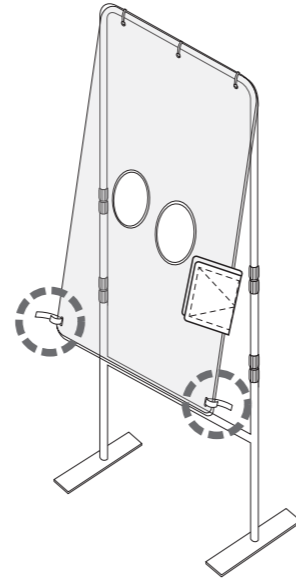

シールドパネルのフチを拭く場合は、  
結束テープを外して拭くことができます。