

新型コロナウイルス & インフルエンザ A/B

抗原検査キット

新型コロナウイルス 変異株対応

研究用

検査1回分



コロナ精度
97.6%

インフル精度
94.3%

簡単
迅速

8分
迅速検出

コロナと
インフルを
Wチェック

インフルエンザの季節到来のこの時期、
体調不良になると新型コロナウイルスとの
違いが気になります。そんな時、同時
に現状を確認できる!!



当社検査キット特長

① 自宅でスピード検査



当社キットは結果がでるまでたったの8分!
その場で結果をすぐに確認する事ができます。

② 簡単セルフチェック



鼻腔を拭い採取した検体で
新型コロナウイルス抗原とインフルエンザA/B
抗原を判定できる使い捨ての簡易検査キット

③ CE認証取得済



ヨーロッパ連合(EU)加盟国の規格を統一した
安全基準を満たしております。

④ 2種類同時検査可能



新型コロナウイルス + インフルエンザA/B
2種類同時に検査できます。

誰でも簡単 4ステップで検査完了

Step 1

専用検体希釈液入りチューブの封筒シールをはがし、希釈液の裏面のチューブホルダーに差し込んでください。

Step 3

キャップをチューブに押し込んで閉めてください。次にチューブを振って検体と希釈液を混合させます。
※チューブを揺るときは、吐出口から検体抽出液が出ないようにご注意ください。

Step 2

検体を採取した検棒を速やかに検体希釈液入りチューブに入れます。検棒をチューブの両側に約10秒間、回転させながら押し付けてください。検棒からできるだけ多くの検体を採取するために、チューブを強く押さえ、液を絞るように検棒を引き抜きます。

Step 4

テストプレートの5の印字があるくぼみ2カ所に、それぞれ3滴の抽出液を滴下し、静置します。テストプレートを8分静置した後、結果を読み取ります。
※検体抽出液の滴下は5滴とし、それ以上は滴下しないでください。判定結果がエラーになります。

- 新型コロナウイルス&インフルエンザA/Bを同時検査
- 精度:コロナ97.6% インフル94.3%
- 新型コロナ変異株対応
- 使用期限 2年
- 検出時間:8分
- 研究用

内容物

テストプレート×1本/乾燥剤×1個/専用検体希釈液入り
チューブ×1本/滅菌綿棒×1本/検査手順説明書×1枚

本体サイズ

約200×70×奥行20mm

商品 C D	874063
商品名	Wチェック抗原検査キット
品番	KO316
参考価格	¥1,700
卸価格	

お問い合わせは