

SUPPORT SIGN SMART - SPSS 車いすタイプ 標語・ホワイトボード付 (SPSS-ISU-HBWB) 取扱説明書 -

可変式サインスタンド 非常搬送用車いす型スタンド看板
 この看板は緊急時、非常用車いすとして使用する事ができます。 特許第 6039125 号

はじめに、この度はTOKISEI商品“サポートサイン”のご購入ありがとうございます。
 ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

- あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのサポートする車いすです。使用上の注意をお守り頂き正しくご利用下さい。
- 看板としてご利用頂く場合は、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意

- 緊急時に一旦取り外した面板部分は破損が無ければ再度取り付け可能です。



注意 【重要】人を乗せるシート部分(ターポリン)は耐久年数があります(交換は販売元にお問合わせ下さい)

セット内容 はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認下さい。

- 横パイプ 2本
- ボルト 4本
- 座席用シート大 1枚
- 六角レンチ 1本
- 取扱説明書 1枚

※手順にそって組立を行っていきます。組立の際には付属の六角レンチでボルトが動かなくなるまで締め込んで下さい。

※また、本製品は防災機器としての機能を損なわない様定期的にビスの緩みやフレームの歪みなどをご確認頂く事をお願いいたします。

※標語ボードの文言の種類は「熱中症対策」を含み全35種類ございます。導入後ボードのみのご購入も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

組立方法 ① 本体は折りたたんだ状態でお届けしております。

② 閉じているパネル側フレームと支えフレームを開き付属の横パイプで接続する(テーブルや床に横向きに寝かせた状態で作業する)

テーブルや床

③ 横パイプ両側の黒いキャップがフレームに沿うように合わせる(突起がある側が外侧)付属のボルトで4箇所をまず、手で仮止めをした後、六角レンチで固く接続してください。

テーブルや床

④ 本体を立てさせて、ゆがみなどをチェックしご利用下さい。

パネル側フレーム 支えフレーム

車いすとしてのご利用方法

本体フレームは、車いす使用時のフレームとして利用しますので、面板(ボード)部分だけを本体フレームから抜き取ります。

緊急時に非常用車いすとして活用して頂く事ができます。

変形方法を動画で確認
 看板から車いすに変形するシーンを動画でご覧頂けます。(YouTubeが開きます)

※ご注意
 ホワイトボードのエッジ(切り口)は表面の塩ビシートの巻き込みで保護しております。取り扱いにご注意下さい。(設置時はフレームで巻き込み部分は隠れます。)

簡単 2STEP で変身

パネル上部のネジを2ヶ所はずし上部フレームを外します

面板(標語・ホワイトボード)を引き抜きます

成人1名を乗せる事ができます。

注意
 ・対象者の脚を巻き込み防止するため、パネル側フレームより前に足を出して座らせて下さい。

車いす変形後のご活用方法

1) パネルフレーム上部の樹脂コーナーを止めている左右のビスを緩め取り外します。ビスを外したらフレームの上辺を上へ引き抜いて下さい。(ビスが固い場合はコインなどをご利用下さい。)

2) フレームを外した上側から、面板を引き上げて面板(ボード)を反転させます。

3) フレーム上辺に戻して差し込み左右をビスで固定します。
 ※ビスはしっかり締め、固定して下さい。

ホワイトボードのご利用方法
 ボードへ書き込む際は、必ず水性マーカーをご使用下さい。

- 面板のマーカーボードはマグネットを使用する事ができます。
- ご注意
 フレームから外す際には、ボードのエッジ部分(切り口)でお怪我のないようご注意ください。
- お手入れ方法
 かるく水拭きしその後、乾拭きして下さい。

面板を引き抜き後、再度上部フレームに戻すことで、背後から押す際の持ち手となります。

標語ボード単体のご購入も可能

オプションで 標語ボード単体のご購入も可能です。表記のデザインより 1種類デザインをお選び下さい。(別注対応可能 ご相談下さい)

ご使用について
 ・担架、車いすの代用品として使用することで緊急時に時間を短縮し何か人助けをする事が看板にできないかと考えて作った商品です。あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には安静を守りむやみに移動させないで下さい。
 ・人の他に救援物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の性質状、伸びる点等に考慮し積み方を注意して下さい

設置の際に
 ・いたずらで利用させない工夫を設置側のお客様で行って下さい。(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
 ・皆様の助け合い思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心よりお願い申し上げます。

販売元