


非接触型 検温 サーモグラフィーカメラ X THERMO 取扱説明書

●商品を正しく安全に使用して頂く為に、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。


納品物一覧 開封時に必ずご確認ください。

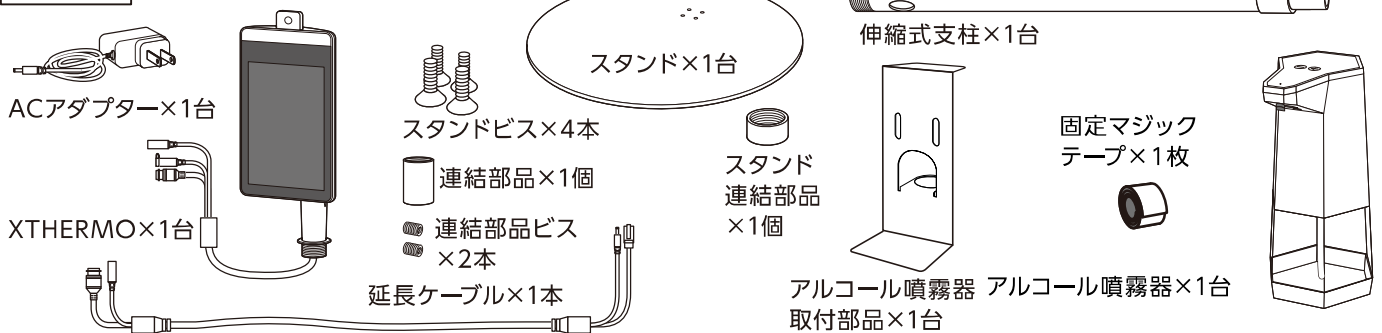

<組立方法>



- ①伸縮式支柱の穴から延長ケーブル雄（プラグ）側を差し込み、支柱上側から出しセットします。
- ②スタンド連結部品を伸縮式支柱に回し入れ、取り付けます。
- ③スタンドをスタンドビス4本で取り付けます。
※延長ケーブルを通した穴が後方を向くように取り付けます。
- ④伸縮式支柱のハンドルを回し、少し伸ばします。
- ⑤X THERMOのコードを、アルコール噴霧器取付部品の穴が小さい方と、連結部品に通し、連結部品をX THERMOに回し入れてください。X THERMOのコードは連結部品の穴が大きい方にも通してください。

- ⑥ACコードを接続し伸縮式支柱の中に入れ、連結部品（X THERMO）を伸縮式支柱に差し込み、連結部品ビス2箇所固定します。
- ⑦伸縮式支柱下のケーブルにACアダプターを接続し、電源へ差し込んでください。

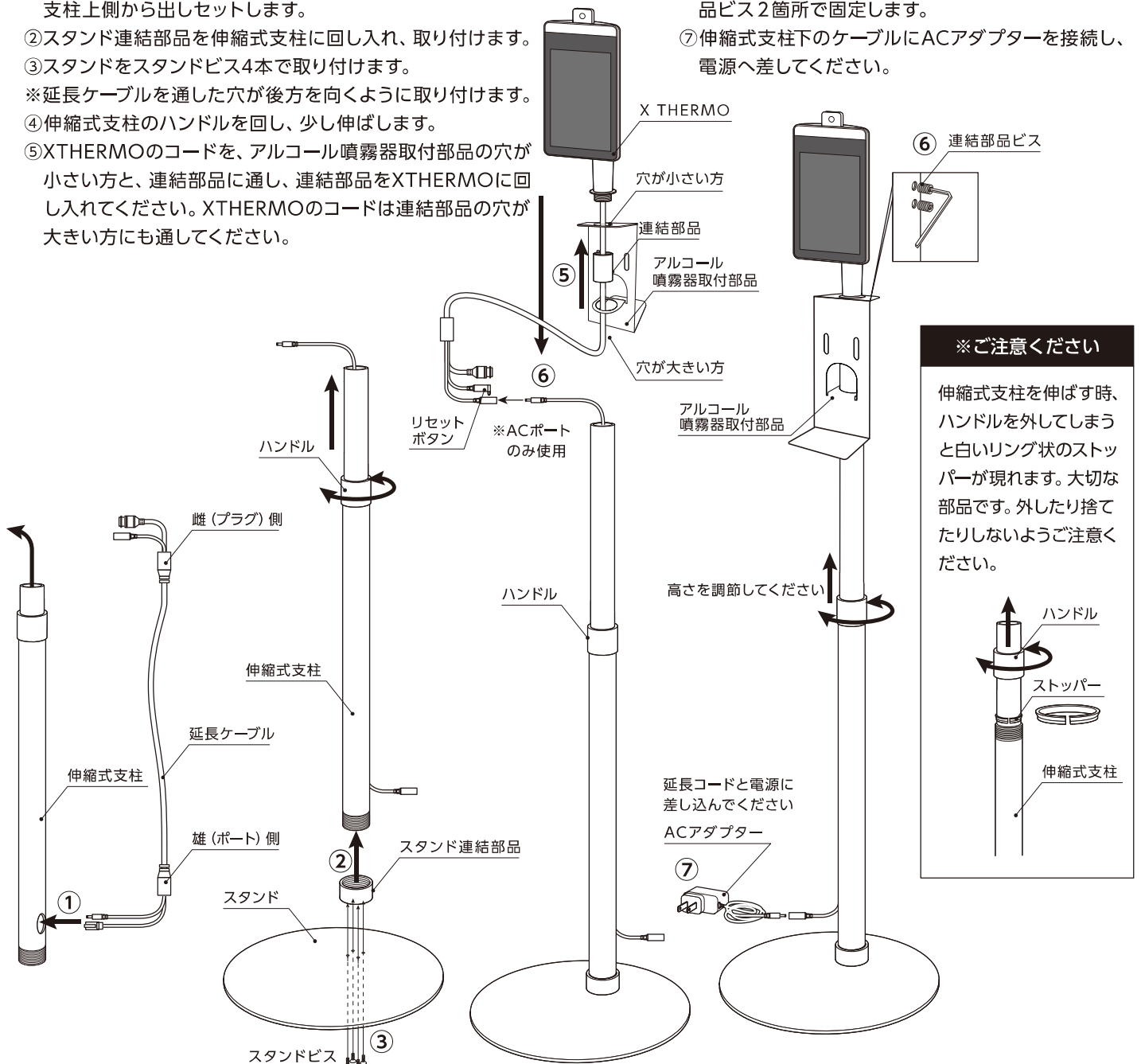

<アルコール噴霧器の取付>

アルコール噴霧器を固定用マジックテープで背板に巻付けて完成です。

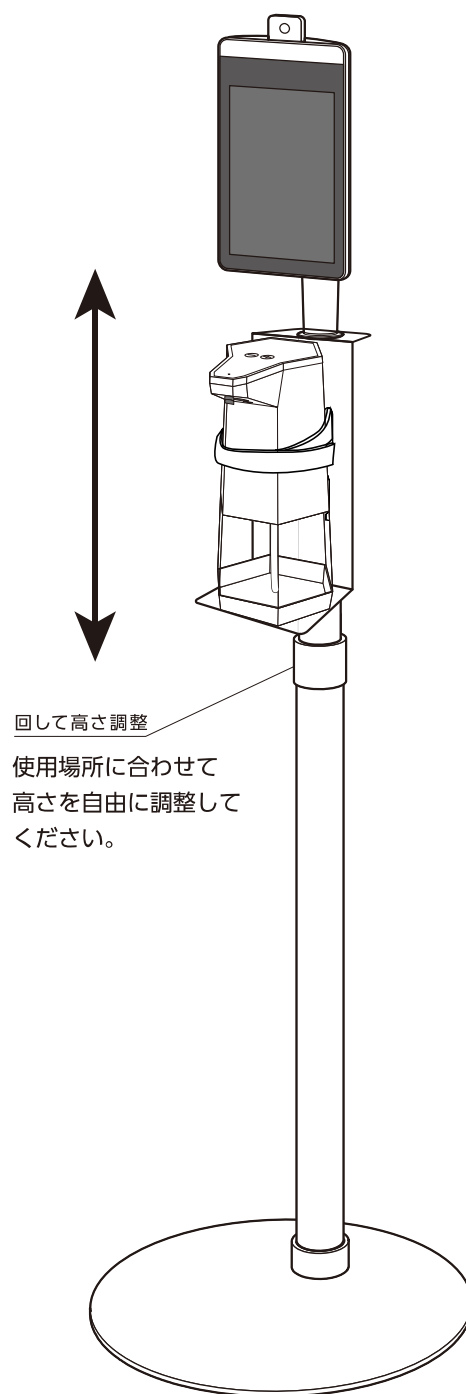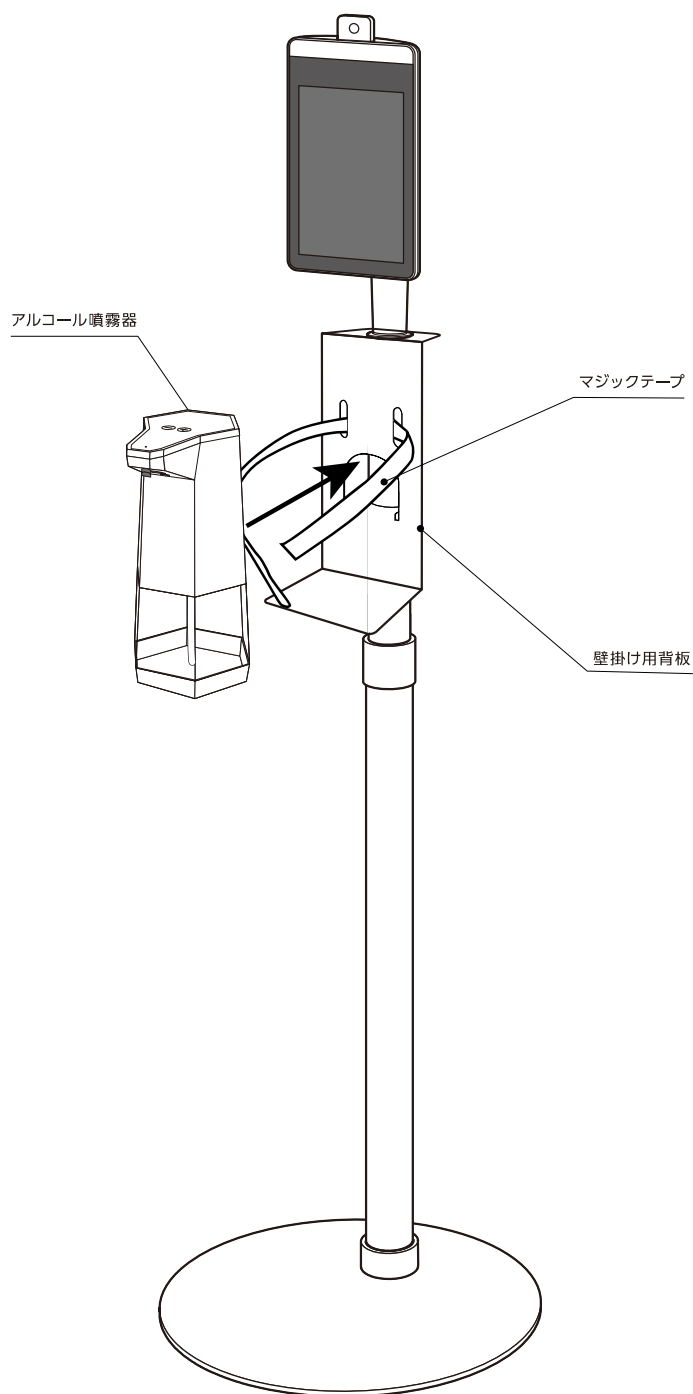

※一部ビスは取付けられた状態で梱包されております。

※アルコール噴霧器の壁掛け用背板を支柱に貼った後は約6時間経過してからアルコール噴霧器を取り付けてください。（粘着確認）

<注意事項>

※設置する前に必ず本体に傷がないか確認してください。※製品改良の為、仕様・デザインなど予告なく変更する事がございます。※防水機能はありません。本体を濡らさないよう気をつけてください。※高温、低温の環境でこの製品を使用しないでください。ボトルに酸、アルカリ、油、その他の液体を入れないでください。※自分で分解・修理しないでください。※こちらの製品は室内対象商品になります。※保証期間はご購入日より三ヶ月となります。納品書が保証書の代わりとなりますので大切に保管をお願いします。