


アルコールチェッカー 取扱説明書 MI-ALC-01

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。
お読みになられた後は大切に保管してください。

<各部の名称>

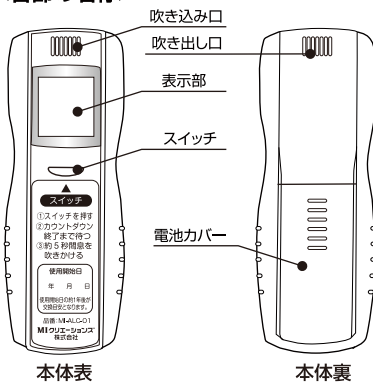

センサー寿命: 約1年または測定回数1,000回の
どちらか早い方。
※参考値です。保証値ではありません。
本体に「使用開始日」を記載することで、
日付で交換目安を管理できます。
測定回数は別途管理してください。

<電池のセット方法>

本体裏の電池カバーを
下方向にスライドして
外し、単四アルカリ乾
電池2本を右図の方向
にセットします。次に
電池カバーを取り付け
ます。



<測定方法>

1. スイッチを約1秒間長押しします。
2. 「ピッ!」という電子音とともに「WAIT」と表示され18のカウンtdownが始まります。
(カウンtdownの時間が長くなる場合や、2回続けてカウンtdownする場合がありますが、異常ではありません。)
- *これは、長時間使用していない時や低温での環境下の使用時に起きやすい現象です。
3. カウンtdownが終了すると「ピッ!」という電子音とともに「C」の文字が左から右にスクロールし、測定可能な状態になります。
4. 深く息を吸い、吹き込み口の正面1~2cmの位置から電子音が鳴るまで息を吹きかけてください。

測定範囲は 0.00~1.00mg/ℓ です。

結果は約10秒間表示して自動的に電源が切れます。

*アルコール以外の成分に反応する場合があります。
飲食後20分以上時間をおいたり、うがいをしてからご使用ください。
(反応の出やすい例)
薬の服用、喫煙、洗口剤使用や歯磨き後など。

電池交換サイン

電池の残量が低下してくると、表示部に電池電圧低下マークが表示されます。

マークが表示されたら、お早めに電池を交換してください。

5. 再度測定する時は、再び正面のスイッチを押してください。改めてカウンtdownが始まり、測定モードになります。

<仕様>

測定表示範囲	0.00~1.00mg/ℓ
アラーム設定レベル	0.15mg/ℓ
測定時間	約5秒
ウォームアップ時間	18カウント(約30秒)
使用環境温湿度	0~40℃、80%RH以下
電源	単四アルカリ乾電池2個
寸法	約103×37×20(mm)
重量	約50g(電池含む)

*電池は別売です。

*一般的な症状の目安で、
体調や個人の体質によって
酔い具合には差があります。

<測定結果の表示目安>

0.00 mg/ℓ	平常時	0.40 mg/ℓ	適度に酔い、 機嫌が良くなる
0.10 mg/ℓ	酔いはじめ	0.50 mg/ℓ	感情の抑制が 出来なくなる
0.20 mg/ℓ	顔や皮膚が上気 適度な酔い加減		
0.30 mg/ℓ	感情が高ぶり多弁になる 行動が大きくなる	0.50 mg/ℓ 以上	飲みすぎ

*FF.F(FF.E)と表示されるとセンサー異常又は、本体寿命となります。

<本品の取扱い上のご注意>

- 自動車などの運転の判断には絶対使用しないでください。本品は飲酒時の運転の可否を判断するものではありません。
- 飲酒時の運転は道路交通法によって禁止されています。本製品の使用の有無に関わらず酒気帯び、酒酔運転などによる交通事故及び損害事件、その他のトラブルに対して製造者及び販売者は一切の責任を負いません。
- 運行管理、業務管理に使用される場合、本品の測定結果のみに依存した運用は避けてください。本品の使用によるトラブルについては一切の責任を負いません。

<ご使用上のご注意>

- 分解、改造は行わないでください。
- 過度な衝撃、振動を与えますと破損の原因となります。
- 以下のような状況では正確に測定出来ない場合があります。
 - ・飲酒後すぐ。
 - 飲酒後20分以上経ってから再測定。
 - ・口腔洗浄剤や口臭ケア商品の使用後。
 - よくうがいをしてから再測定。
 - ・吹きかける時間不足時やセンサー口に息が当たっていない時。
 - ・長時間使用していなかった場合。
 - 測定を繰り返す。また電池を入れ替える。
- 以下のような場所・環境では正確に測定出来ない場合があります。
 - ・高温多湿な場所。
 - ・低温な場所。
 - ・風が強い場所。
 - ・においが強い場所。
 - ・空気の汚れた場所。

<お手入れ及び保管上のご注意>

- 以下のような場所では保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所。
 - ・高温多湿、または温度・湿度の変化が大きい所。
 - ・ほこりの多い場所。・においが強い場所。
 - ・水のかかる場所。
- お手入れの際は乾いた布で本体をから拭きしてください。水に濡らしたり、洗剤や揮発性の溶剤のご使用は避けてください。

品質保証書 <保証期間: お買い上げ日より1年間>

弊社では厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には品質保証規定の範囲内で無料で修理致します。その際には現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出ください。

品名	アルコールチェッカー		
品番	MI-ALC-01		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
※販売店	住所 〒		
	店名		
	お買上げ日	年	月 日
※お客様	住所 〒		
	お名前		
	TEL		

※印刷に記入のない場合は、納品書または領収書を本保証書と一緒に保管してください。それ以外は無効です。本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

センサーの消耗による不具合は、保証の対象外となります。

1. お客様が取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合は、本書による無料で修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
 - (2) お買上げ後の落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害などによる故障または損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上げ日、販売店名を記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
 - (5) ご使用後のキズ、変色、汚れ及び保管上の不備による損傷。
3. 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
4. 本書は日本国内にてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)